



KAT

한국판 전산화 주의력 검사

라이선스 등록 및 안내 메뉴얼

Korean Attention Test system

목차

검사소개	3
구매 및 설치	5
라이선스	9
로그인	15
검사결과	18
백업 및 불러오기	22
인적사항 관리	25
사용자 관리	27
설정	29
기타	30

검사소개




KAT

Korean Attention Test system, 한국판 전산화 주의력 검사

KAT (Korean Attention Test system) 한국판 전산화 주의력 검사는 만 5세부터 15세 아동 및 청소년의 시청각 주의력을 체계적으로 평가하기 위해 개발된 검사입니다. 이 검사는 언어능력과 좌우변별능력을 요구하지 않으며, 비언어적으로 전산화되어 연습효과가 없는 검사입니다.

아래와 같이 PC와 태블릿 2가지로 검사를 실시 할 수 있습니다.

* PC버전은 추후 출시 예정입니다.

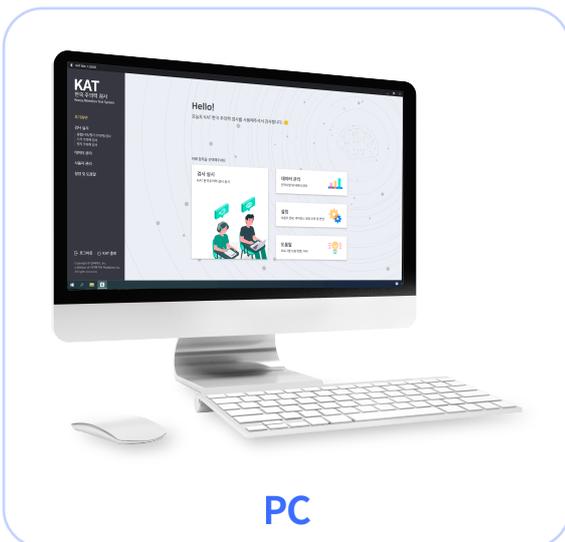

PC



태블릿

해당 검사는 PC와 태블릿 두가지 방식으로 구성되어 있어 편의에 따라 기기를 선택하여 구매해 진행 하실 수 있습니다.

구매 및 설치

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

KAT 프로그램 온라인 구매 및 라이선스 조회는 어떻게 하나요?

아래의 화면 순서를 참고해 주세요.

The screenshots illustrate the following steps:

- 1** Main website: '전문기관 심리검사' (Specialized Institution Psychological Test) page.
- 2** MY페이지 (My Page): '주문 / 결제' (Order / Payment) section.
- 3** MY페이지 (My Page): '구매내역' (Purchase History) section.
- 4** MY페이지 (My Page): '심리검사 결과' (Psychological Test Results) section.
- 5** MY페이지 (My Page): 'ADHD 결과 및 라이선스 조회' (ADHD Results and License Lookup) section.
- 6** License Lookup Window: A detailed table showing license information.

장기 고유번호	주요번호	순번	유형	단	검사	발급일	만료일	수량
04.002.27.00.0006	P210818101302836634	3867	영양제	B	PC형 KAT 한국주의력검사 - 시각	2021.08.18	-	5
	P210818104839826ca77	3868	영양제	B	PC형 KAT 한국주의력검사 - 시각	2021.08.18	-	5
	P2103011654294647864	3756	영양제	A	KAT 한국주의력검사 - 사 - 청각	2021.07.01	-	1
	P2103011658162816282480	3757	영양제	A	KAT 한국주의력검사 - 사 - 청각	2021.07.01	-	1
	P2103021148377aaf3744	3764	기간제	B	ADHD 종합평가 - ACE Tablets	2021.07.01	2022.07.01	-
			기간제	C	ADHD 종합평가 - ACE Tablets	2021.07.01	2022.07.01	-
			기간제	C	ADHD 종합평가 - ACE Tablets	2021.07.01	2022.07.01	-
	P21081730411464847434	3866	기간제	B	ADHD 종합평가 - ACE Tablets	2021.08.17	2022.08.17	-
			기간제	B	ADHD 종합평가 - ACE Tablets	2021.08.17	2022.08.17	-

KAT 라이선스 구매 > 마이페이지 > 심리검사 결과 > ADHD결과 및 라이선스 조회

Q&A 2 PC

KAT 프로그램의 다운로드는 어떻게 하나요?

아래의 화면 순서를 참고해 주세요.

MY페이지
주문, 구매내역, 검사상시, 검사결과, 포인트 서비스를 제공합니다.

상리검사 구매	상리검사 실시	상리검사 결과	구매내역
온라인코드 영도	교육현황(=포스트리우)	변리한 포인트	커뮤니티

① 구매내역의 해당 상품 주문번호 선택

구분	주문번호	구매수량	결제일	회계구분	포인트	주문금	결제금	배송상태	시점
2021-05-24	P210621145350039912	1	2021.05.24	일반	200원	200원	0원	준비완료	온라인
2021-05-24	P2105241462711328165	1	2021.05.24	일반	1,680원	1,680원	0원	준비완료	온라인
2021-05-24	P21052414494061410	1	2021.05.24	일반	145,000원	145,000원	0원	준비완료	온라인

② 다운로드

③ KAT_1.0_Installer

④ KAT 1.0 설치

설치 폴더
C:\Program Files (x86)\KAT\

KAT.exe

KAT 설치 후 실행

* 위의 이미지와 같은 설치경로로 설정 되었는지 확인해주세요.

마이페이지 > 해당 상품 주문번호 선택 > 다운로드 > Installer 실행 > 설치


Q&A1,2에서 안내드린 것과 같은 순서로 구매한 라이선스를 조회하거나 프로그램을 설치할 수 있습니다.

등록방법에 대해서는 다음 '라이선스' 항목에 자세히 설명되어 있습니다.

Q&A 3 PC

설치 중 다른 Setup 설치 화면이 뜨면 어떻게 하나요?

SQLite 파일은 KAT프로그램이 원활하게 작동하기 위하여 필요한 Setup파일입니다. 당황하지 마시고 아래와 같은 순서로 설치하시면 됩니다.

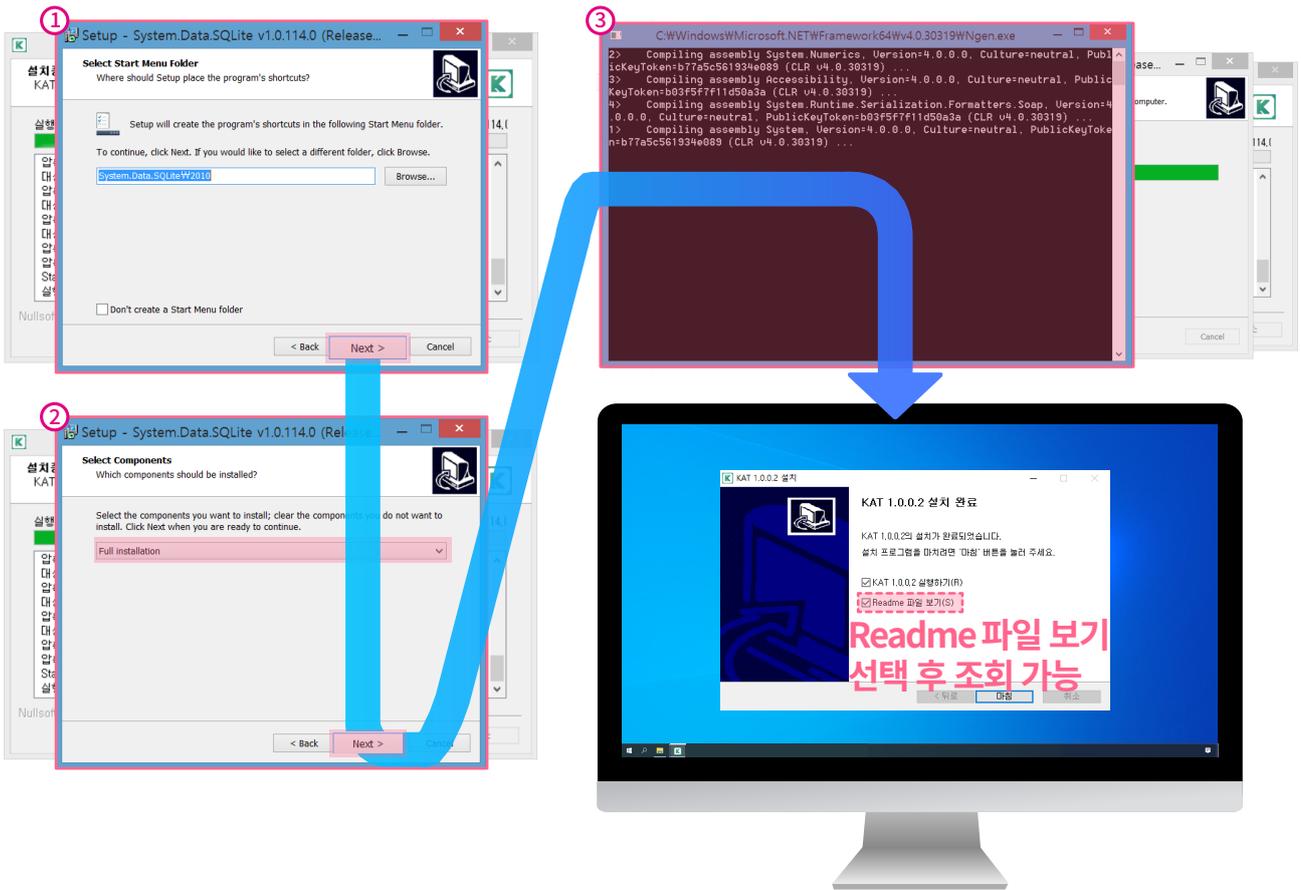


**Setup 파일 설치 권장 > 'Next'로 계속 진행
> 명령프롬프트(검정)화면에서 대기(최대 1-2분 소요) > 완료**

Setup 파일을 다운로드 하셔야 KAT 프로그램이 정상적으로 실행됩니다.

해당 프로그램에 대한 자세한 정보는 설치 완료화면에서 'readme' 파일을 별도로 선택해 확인하실 수 있습니다.

Q&A 4 PC

설치 후 프로그램이 잘려서 보일 경우 어떻게 하나요?

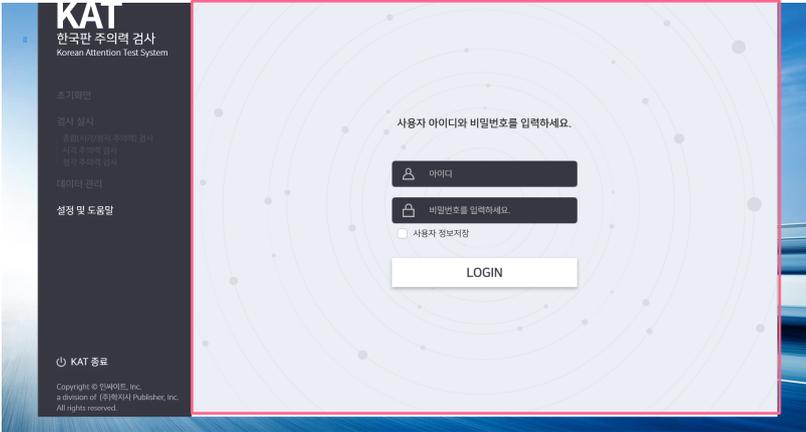

위와 같이 화면이 보일 경우 아래의 순서를 통해 화면 비율을 설정하실 권장드립니다.




바탕화면 우클릭 > 디스플레이 설정 >
 텍스트, 앱 및 기타 항목의 크기 변경 > (권장)이나 최소비율으로 변경

Q&A 5 PC, 태블릿 공통

PC의 경우 업데이트는 어떻게 진행하나요?

태블릿의 경우 와이파이에서 연결된 환경에서 자동으로 업데이트가 이루어지지만
PC의 경우 업데이트 파일을 다운로드하고 기존 설치 경로에 직접 설치하는
 방식으로 진행하셔야 합니다.

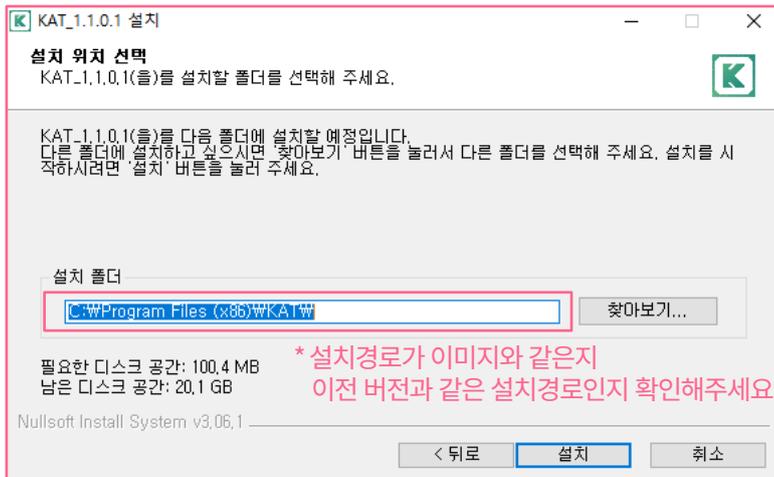

구매 및 설치-Q&A2의 "KAT 프로그램의 다운로드 어떻게 하나요?"

와 동일한 경로에서 인스톨러를 다운로드한 뒤 설치를 진행하시면 됩니다.

마이페이지 > 해당 상품주문번호 선택 > 업데이트 된 파일 다운로드 >
 Installer 실행 > 이전 버전과 동일한 경로에 설치

프로그램 버전

현재버전

업데이트가 적용되었는지는 (설정 및 도움말 > 프로그램 버전)에서 확인이 가능합니다.

라이선스

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

온라인 등록과 오프라인 등록 방식이 어떻게 다른가요?

온라인 등록

와이파이 등 네트워크 연결이 지원되는 환경에서 라이선스를 등록하는 방식입니다.



오프라인 등록

네트워크 연결이 제한된 특수한 환경에서 라이선스를 등록하기 위해 QR코드를 활용하여 등록하는 방식입니다.


Q&A 2 PC, 태블릿 공통

라이선스 온라인 등록은 어떻게 하나요?

PC

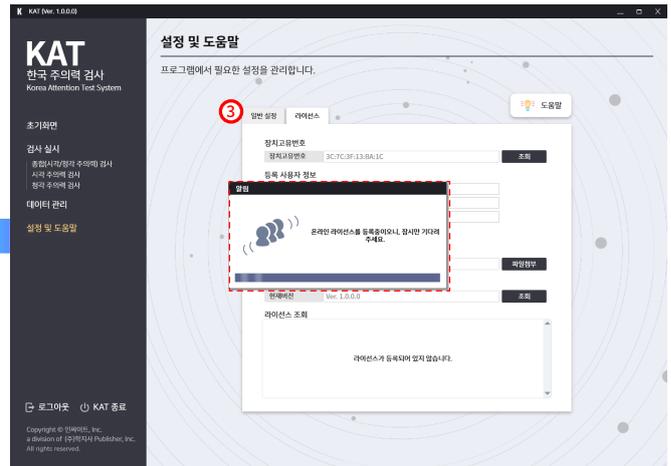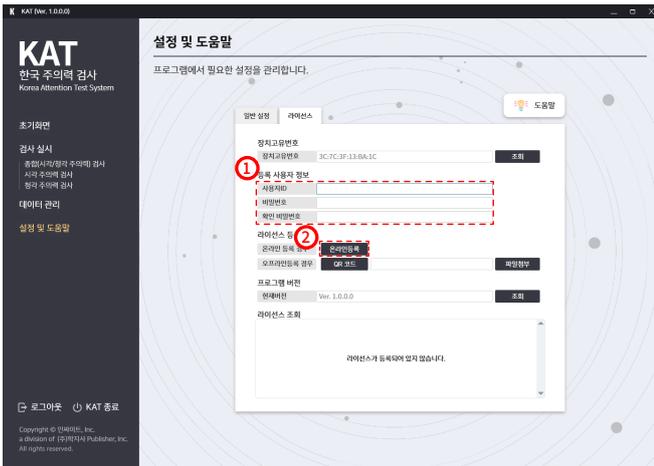

태블릿

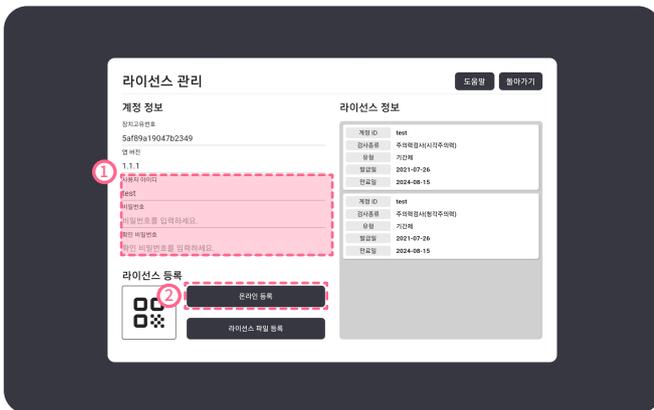

라이선스 > 등록 사용자 정보 입력 > 온라인등록 선택

위와 같은 순서로 온라인 등록을 진행할 수 있습니다.

- 등록 사용자 정보 입력: 라이선스를 구매한 인사이트 아이디와 비밀번호를 입력하시면 됩니다.
- 라이선스 등록 후 로그인: 라이선스를 구매한 인사이트 아이디와 비밀번호 “1234”를 입력하시면 됩니다.

Q&A 3 PC, 태블릿 공통

온라인등록 버튼을 누르자 “라이선스 인증 오류입니다. 라이선스 정보가 올바른지 확인해 주세요.”라는 오류 메시지가 떴습니다.

구매한 인사이트 아이디와 비밀번호를 다시 확인하시고 등록사용자 정보에 입력하신 후에도 문제가 발생한다면 아래로 문의 부탁드립니다.



inpsyt Insight of psychology
인사이트
심리검사연구소


대표전화 02-330-5133
홈페이지 <https://inpsyt.co.kr/main>

Q&A 4 PC, 태블릿 공통

PC에서 라이선스 오프라인 등록은 어떻게 하나요?

아래의 화면 순서를 참고해 주세요.

PC

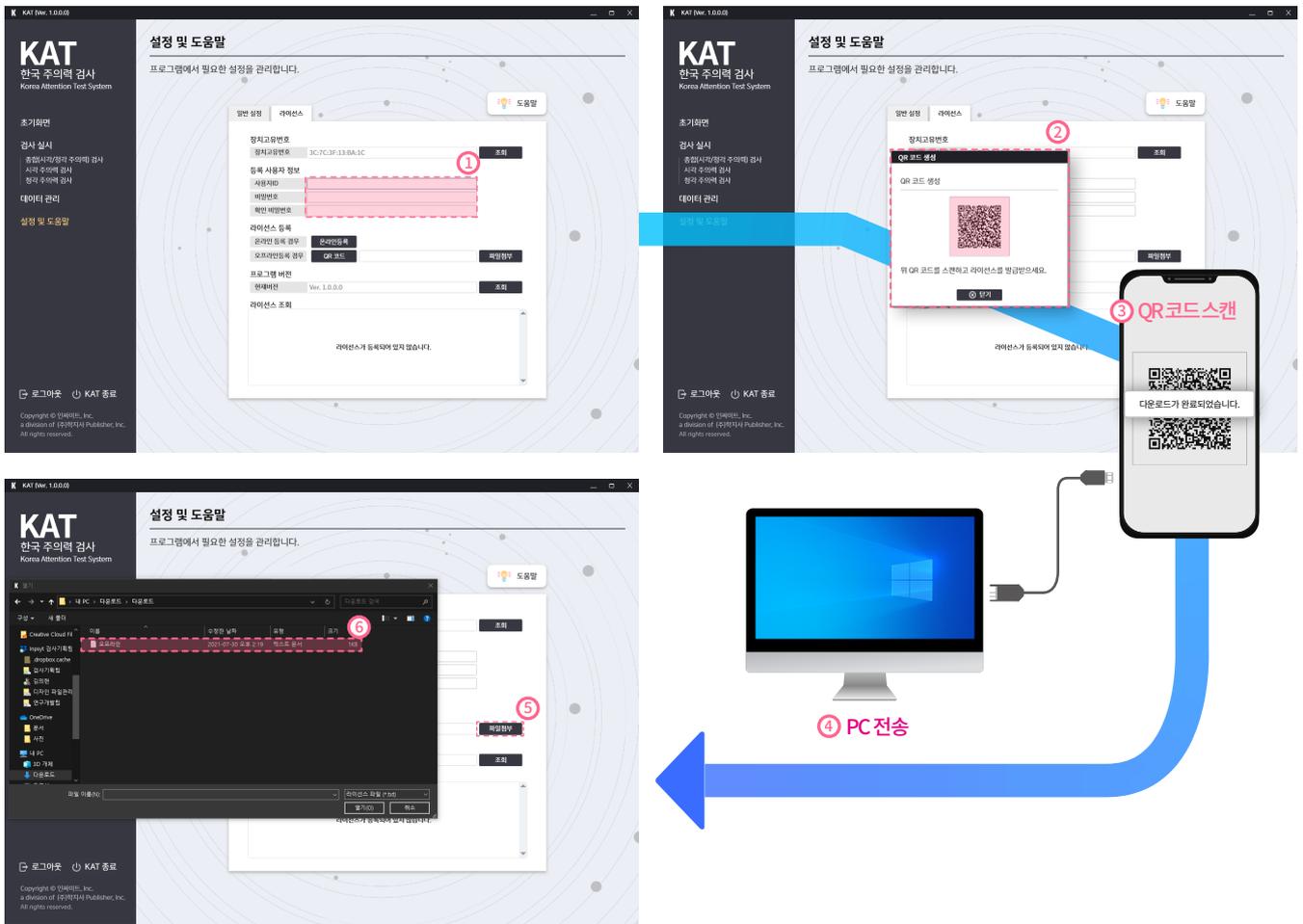

라이선스 > 등록 사용자 정보 입력 > QR코드 > 스캔 > PC 전송 > 파일첨부

위와 같은 순서로 내려받은 텍스트(txt)를 파일첨부를 통해 업로드 하시면 라이선스 등록을 할 수 있습니다.

초기 등록 시에 로그인 **비밀번호가 1234**로 설정됩니다.

PC ③ ④ QR 코드 스캔 후 PC 연결



태블릿




라이선스 > 등록 사용자 정보 입력 > QR코드 > 스캔 > 태블릿으로 전송 > 라이선스 파일등록

위와 같은 순서로 내려받은 텍스트(txt)를 파일첨부를 통해 업로드 하시면 라이선스 등록을 할 수 있습니다.

초기 등록 시에 로그인 **비밀번호가 1234**로 설정됩니다.

다운로드 파일을 태블릿으로 공유하는 상세내용(3, 4번 과정)도 참고해주세요.

태블릿 ③ ④ QR 코드 스캔 후 태블릿 연결

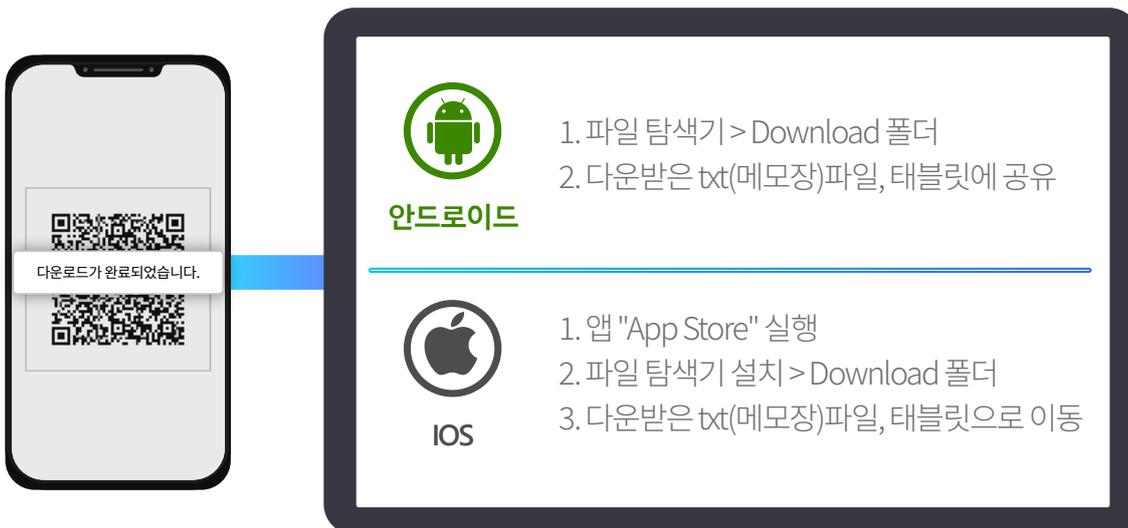

로그인

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

로그인이 안 됩니다. 어디에 문의해야 하나요?

최초 관리자 로그인이 불가한 경우는 라이선스 기간이 만료되었거나, 아이디 및 비밀번호를 분실한 경우입니다.

***최초 관리자란?**
라이선스 등록 후 최초의 로그인 아이디를 말합니다.

라이선스 기간 만료인 경우
다시 라이선스를 구매하여 등록하신 후 이용해주시기 바랍니다.

아이디 및 비밀번호 분실인 경우
최초 관리자 아이디를 제외한 그 외의 아이디에서 로그인이 안되는 경우는 관리자 권한을 가지고 있는 계정을 이용해 아이디 조회 및 비밀번호 변경을 해주시기 바랍니다.

최초 관리자 아이디 및 비밀번호를 분실한 경우는 아래 번호로 문의 부탁드립니다.



Insight of psychology

인사이트

심리검사연구소

대표전화 02-330-5133


홈페이지 <https://inpsyt.co.kr/main>

Q&A 2 PC, 태블릿 공통


아이디/비밀번호를 어디서 바꿀 수 있나요?

아이디 변경은 지원하지 않으며 비밀번호 변경은 아래 화면 순서를 참고해 주세요.

PC

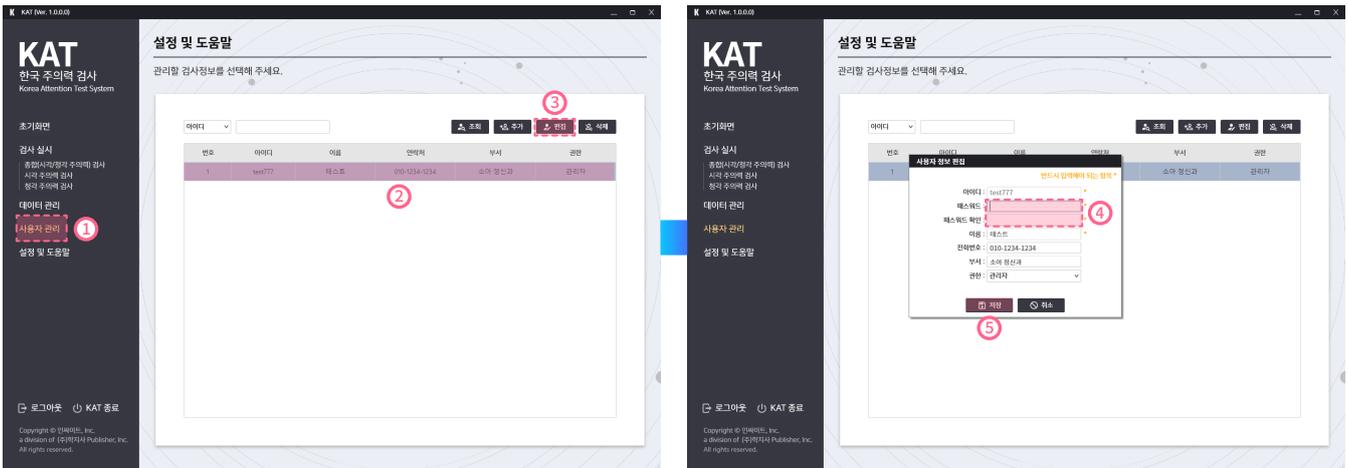

태블릿

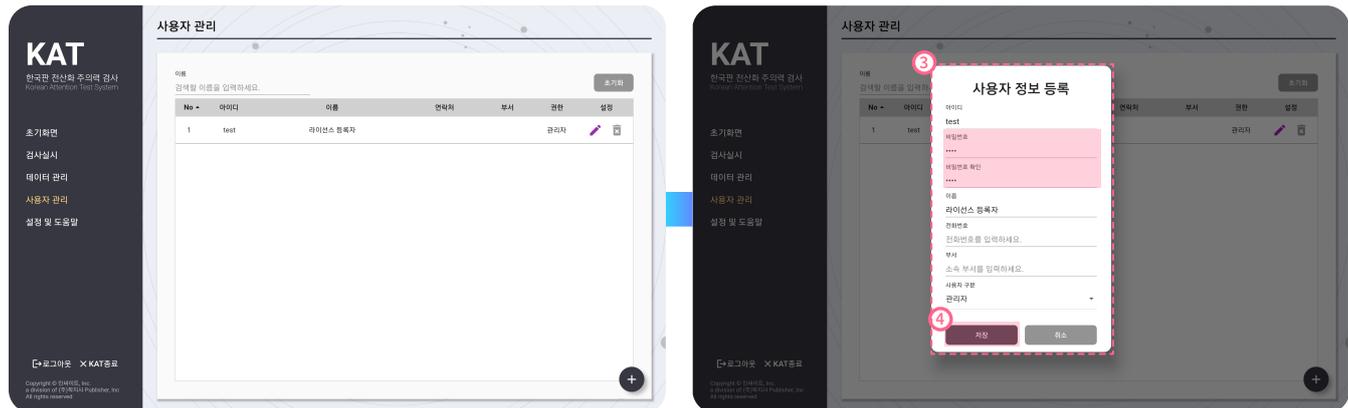

사용자 관리 > 아이디 선택 > 편집 > 정보 입력 > 저장


사용자 권한의 아이디 및 비밀번호 변경이 필요하신 경우는 관리자 계정을 통해 위와 같이 변경해주시기 바랍니다.

Q&A 3 PC, 태블릿 공통


아이디 생성은 어떻게 하나요?

관리자 권한의 계정에서만 아이디 생성이 가능합니다. 아이디 생성의 절차는 아래의 화면 경로를 참고해주세요.

PC

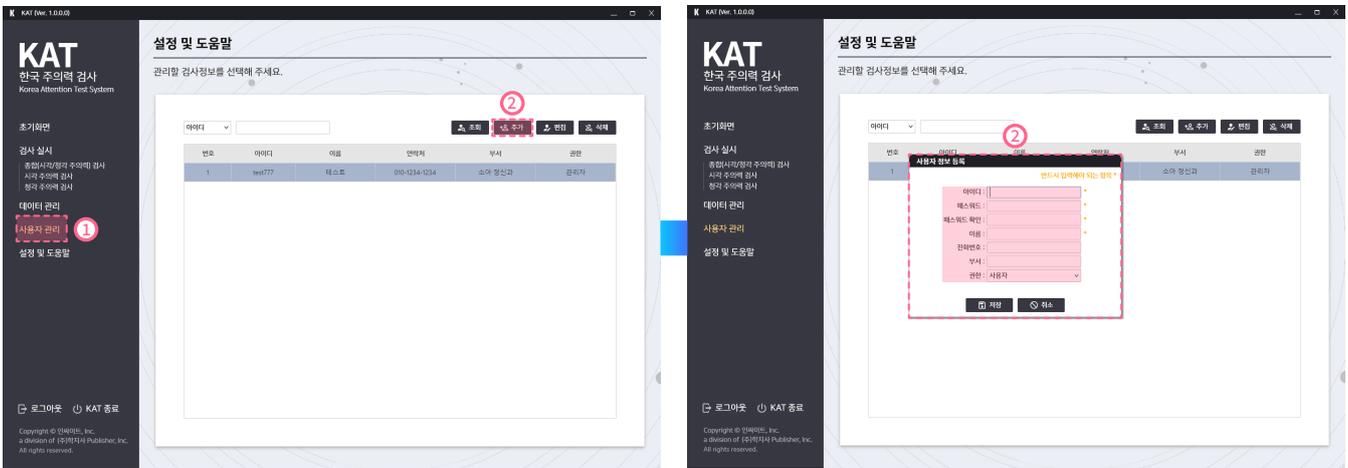

태블릿

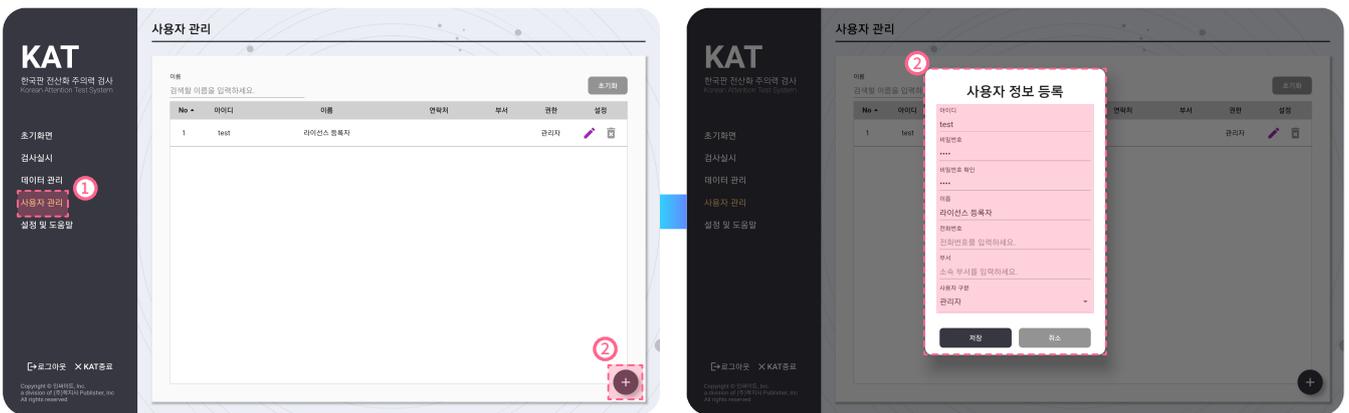

사용자 관리 > 추가 > 정보 입력 > 저장


검사 결과

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

이전 검사결과 조회는 어떻게 하나요?


이전 검사결과 조회에는 2가지 방법이 있습니다.

첫 번째,
검사 실시 전 검사 대상자의 이름 조회를 활용한 방법으로 아래와 같습니다.

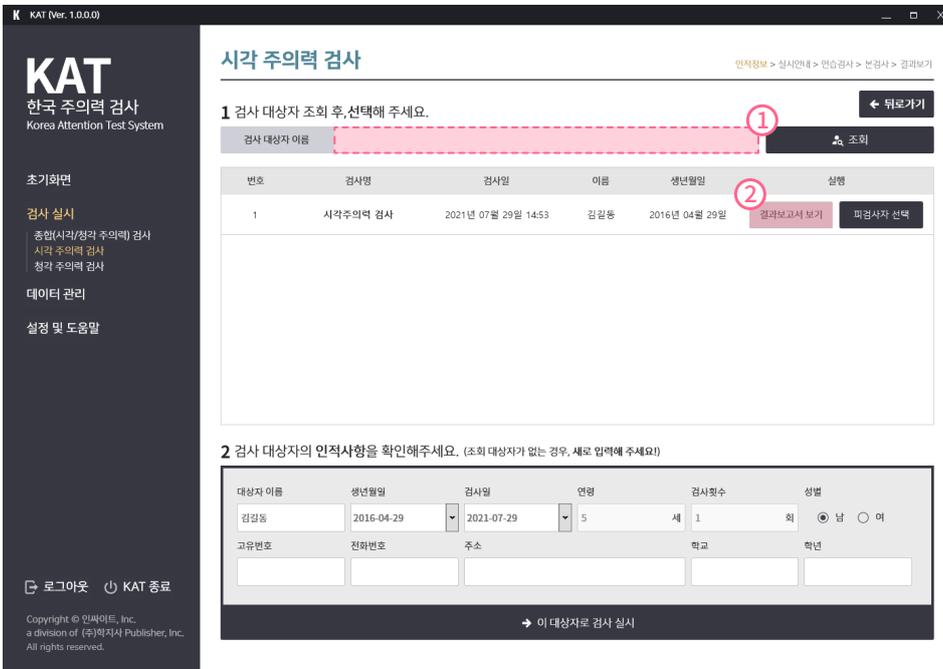

검사 > 바로가기 > 검사 대상자 이름 입력 > 조회 > 결과 보고서 보기

두 번째,
데이터 관리 메뉴를 이용한 방법으로 아래와 같습니다.

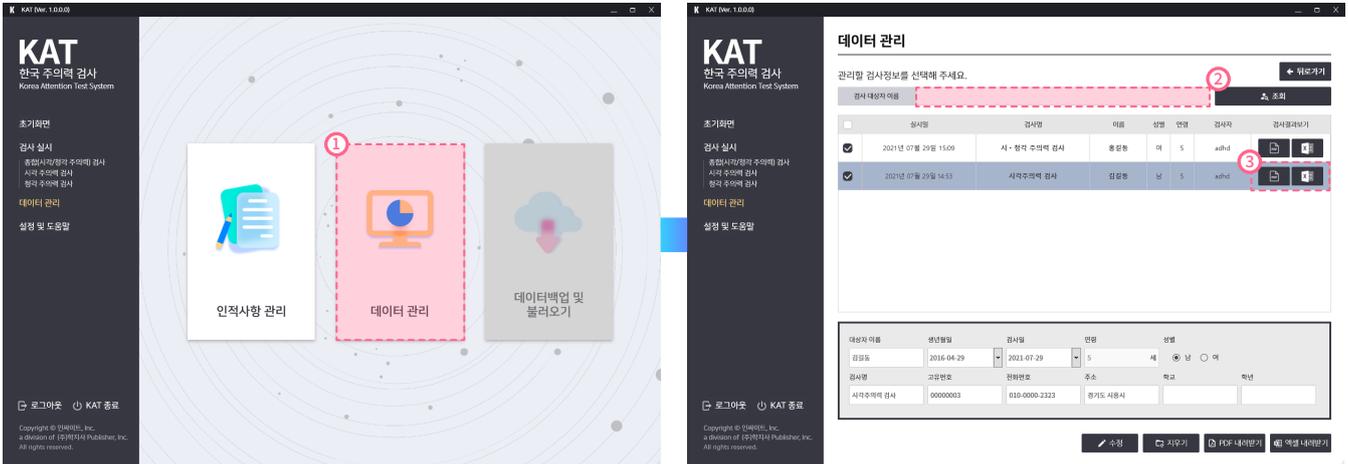

데이터 관리 > 검사 대상자 이름 입력 > 조회 > 결과 보고서 보기

위와 같은 순서로 해당하는 대상의 검사결과를 조회할 수 있습니다.

Q&A 2 (PC, 태블릿 공통)

검사결과를 한 번에 보려면 어떻게 하나요?

검사결과를 한 번에 보려는 경우, 이전 **검사결과-Q&A1**의 **"이전 검사결과 조회는 어떻게 하나요"**

와 경로가 동일하기 때문에 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

피검사자 정보에서 찾고자 하는 정보를 입력 후 조회버튼을 누르면 검사 결과 조회가 가능합니다.


Q&A 3

PC, 태블릿 공통

검사결과 중 일부만 삭제하는게 가능한가요?

현재 검사결과 데이터 삭제 기능은 지원하지 않습니다.

단, 이름, 생년월일, 성별을 제외한 정보는 아래와 같이 수정 가능합니다.

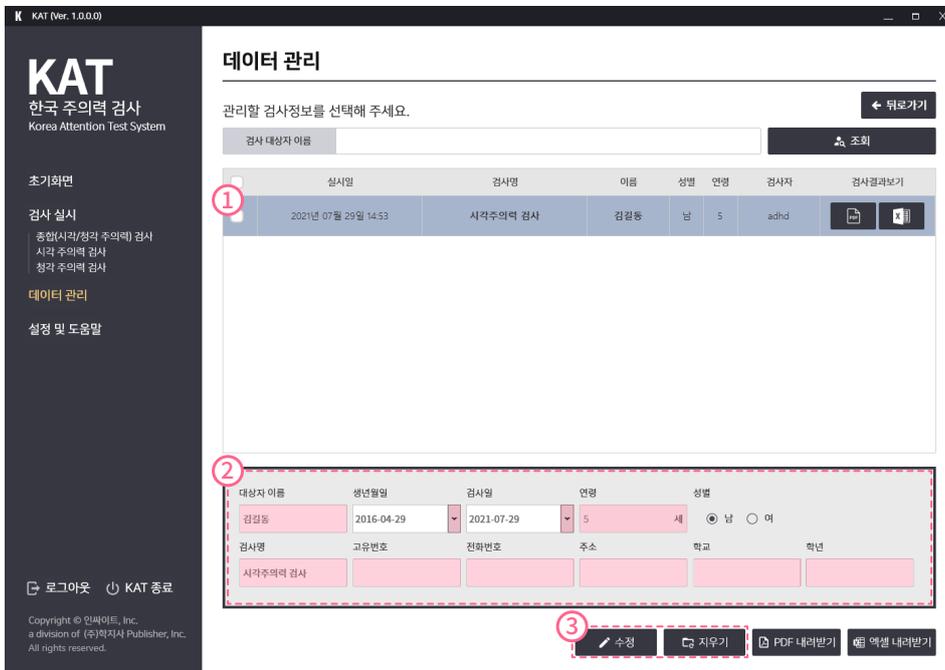


데이터 관리 > 수정하고자 하는 대상 선택 > 수정사항 작성 > 수정 및 지우기

Q&A 4 PC, 태블릿 공통

여러 명의 데이터를 한 파일로 다운받으려면 어떻게 해야 하나요?

아래의 화면 순서를 참고해 주세요.

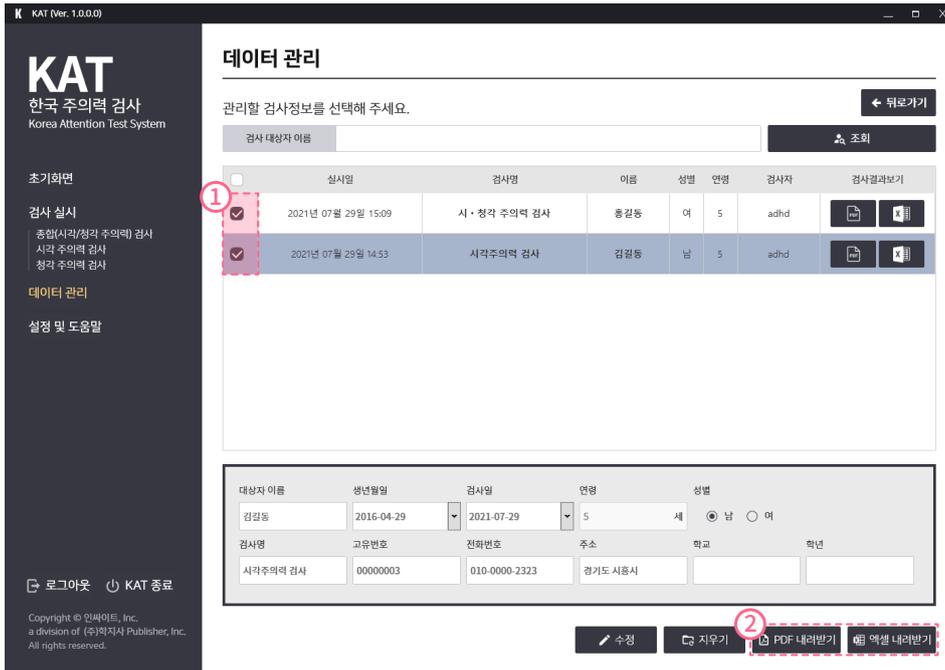

데이터 관리 > 다운받고자 하는 검사결과 선택 > PDF/엑셀 내려받기

PDF 내려받기 경우

체크한 여러 개의 검사결과를 지정한 폴더에 각각의 PDF파일로 다운받을 수 있습니다.

엑셀 내려받기 경우

체크한 여러 개의 검사결과를 지정한 폴더에 한 개의 엑셀파일로 다운받을 수 있습니다.

위와 같은 순서로 PDF 및 엑셀 내려받기가 가능합니다.

백업 및 불러오기

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

데이터를 따로 보관할 수 있는 방법이 있나요?

데이터를 따로 보관할 수 있는 방법에는 2가지가 있습니다.

첫 번째


검사결과 데이터만 따로 보관하고자 하는 경우, 검사결과-Q&A4의

"여러 명의 데이터를 한 파일로 한번에 다운받으려면 어떻게 해야 하나요?"


와 경로가 동일하기 때문에 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

두 번째
 검사결과를 포함한 모든 프로그램 데이터를 보관하고자 하는 경우,
 아래 화면 순서와 같습니다.

PC

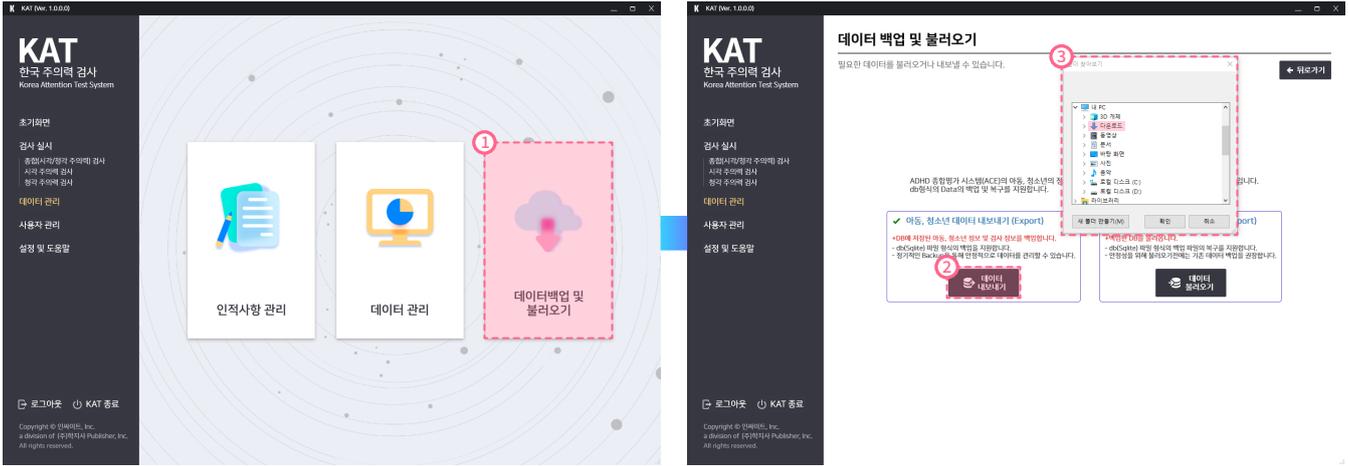

태블릿

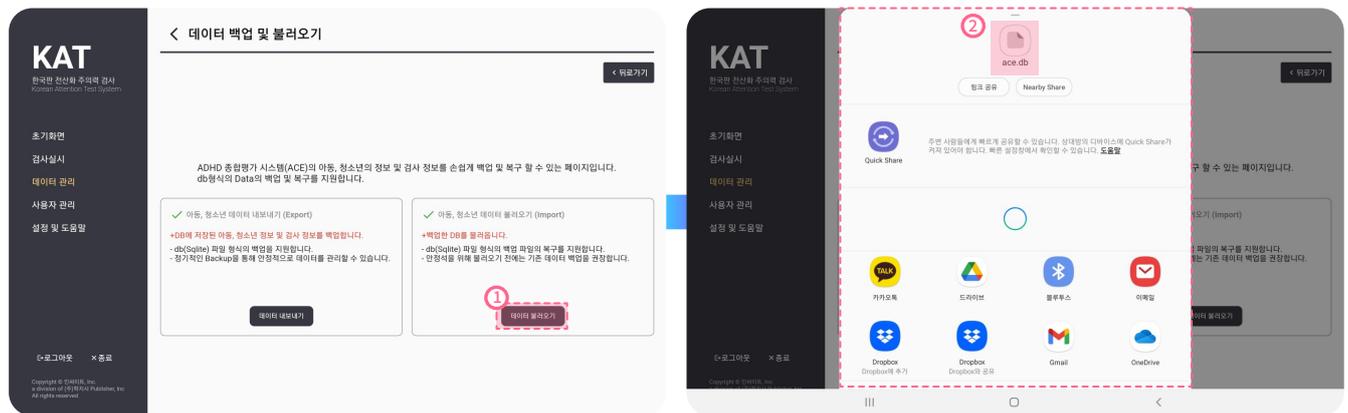

데이터 관리 > 아동, 청소년 데이터 내보내기 (Export) > 저장 폴더 지정

위와 같은 순서로 데이터베이스(DB) 파일을 지정한 폴더로 내보낼 수 있습니다.



* PC 및 태블릿의 포맷, 프로그램 삭제 등 DB파일이 손상 및 유실될 경우에 대비해 주기적인 데이터 백업을 권장드립니다.

Q&A 2 PC, 태블릿 공통



내보낸 데이터 베이스(DB) 파일을 어떻게 불러 올 수 있나요?

아래의 화면 순서를 참고해 주세요.

PC

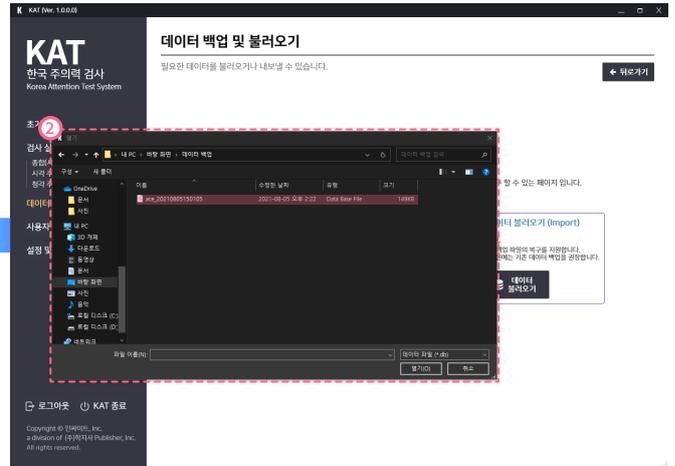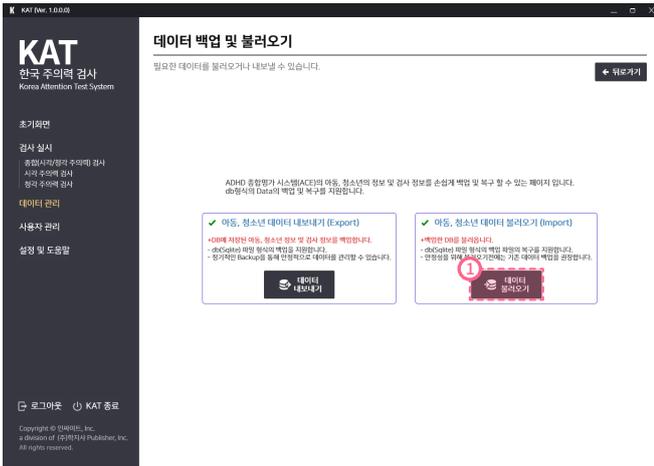

태블릿

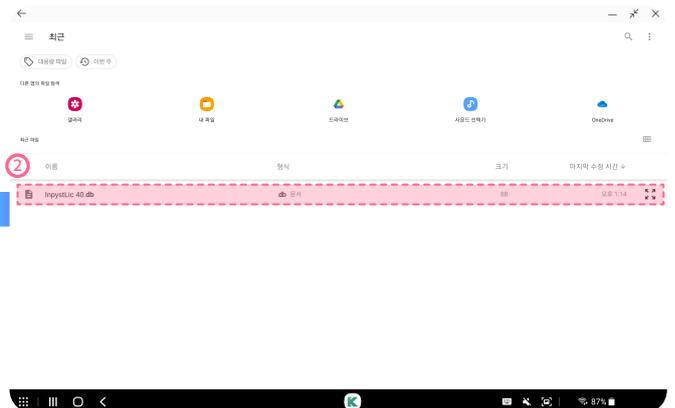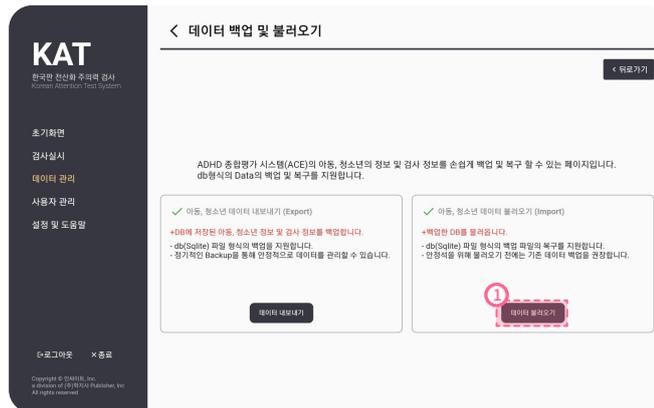

데이터 관리 > 아동, 청소년 데이터 불러오기 (Import) > 불러올 DB 파일 선택 > 열기

위와 같은 순서로 데이터 베이스(DB) 파일을 불러올 수 있으며, 기존에 있던 데이터와 병합되는 것이기 때문에 데이터 유실은 없습니다.

인적사항 관리

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

이미 등록된 인적사항을 삭제할 수 있나요?

현재 인적사항 데이터 삭제 기능은 지원하지 않습니다.

단, 고유번호, 전화번호, 주소, 학년은 수정 가능하며 수정방법은 [검사결과 - Q&A3](#)의

Q&A "검사결과 중 일부만 삭제하는게 가능한가요?"

와 경로가 동일하기 때문에 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

* 수정한 아동과 관련된 검사결과 데이터 모두 수정사항이 반영되므로 유의해주시기 바랍니다.

Q&A 2

인적사항 관리의 고유번호는 무엇인가요?

검사자가 피검사자에게 임의로 부여해 식별이 용이하도록 보조하는 번호입니다.

조회할 때 특정 고유번호에 해당되는 데이터만 따로 검색할 수 있습니다.

대상자 이름	생년월일	연령	성별
김정우	2016-01-01	5	세 <input checked="" type="radio"/> 남 <input type="radio"/> 여
고유번호	전화번호	주소	학교
00000001	010-0000-0000	서울특별시 마포구	학지대학교
			학년
			1

Q&A 3 PC, 태블릿 공통

전체 피검사자 조회는 어떻게 하나요?

피검사자 조회는 2가지 방법이 있습니다.

첫 번째

중복과 상관 없이 여태껏 실시한 모든 검사결과 데이터를 확인하고 싶은 경우


검사결과 - Q&A1의 "이전 검사결과 조회는 어떻게 하나요?"

와 경로가 동일하기 때문에 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.

두 번째

오로지 피검사자(검사대상자)의 인적사항을 중복 없이 조회하고 싶은 경우

아래 화면 순서를 참고해 주세요.

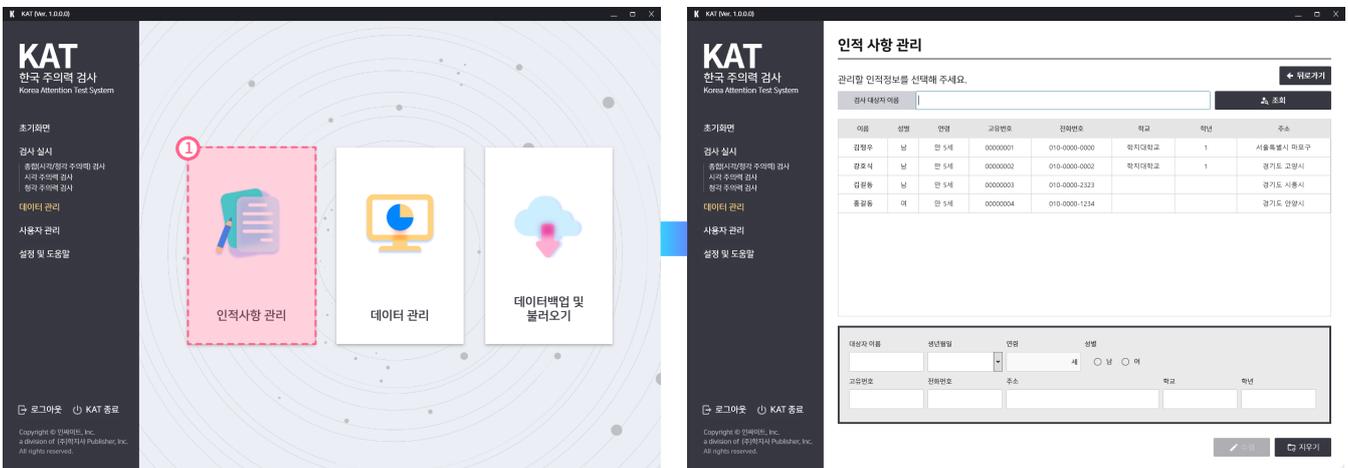

사용자 관리

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

관리자와 사용자의 권한 차이는 무엇인가요?

관리자

프로그램 내의 모든 검사결과, 인적정보에 대한 접근권한을 가지고 있으며, 사용자 관리를 통해 아이디 생성이 가능합니다.

사용자

해당 접속 계정에서 실시한 검사결과, 인적정보에만 접근 가능하며, 사용자 관리 메뉴에는 접근이 불가능합니다.

Q&A 2 PC, 태블릿 공통

사용자 추가는 어떻게 하나요?

사용자 추가방법의 경우, [로그인-Q&A2](#)의 "[아이디 생성은 어떻게 하나요?](#)"와 경로가 동일하기 때문에 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.


사용자 관리 > 추가 > 정보 입력 > 저장

Q&A 3 PC, 태블릿 공통

사용자 접속이력 조회는 어떻게 하나요?

계정의 접속이력 조회는 관리자 권한을 가지고 있는 계정에서만 조회가 가능합니다.

아래 화면 경로를 참고해서 진행해 주세요.

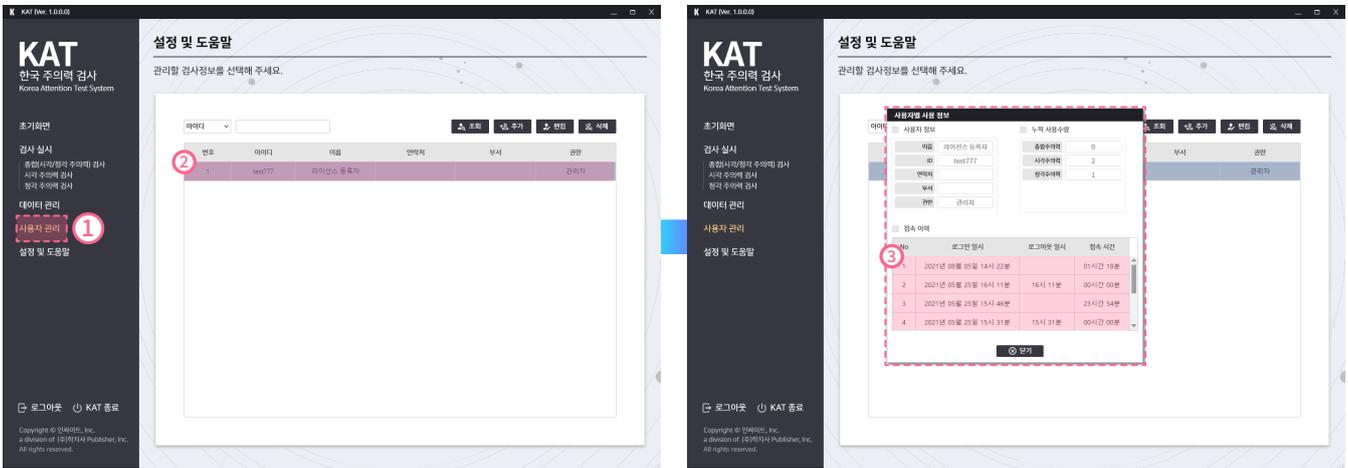

사용자 관리 > 조회하고자 하는 아이디 더블클릭 > 확인


위와 같은 순서로 사용자 접속 이력 조회 가능합니다.

설정

Q&A 1 PC, 태블릿 공통

결과지 표지의 기관 로고는 어떻게 등록하나요?

아래와 같은 순서로 결과지 표지의 기관명 및 로고 수정 가능합니다.

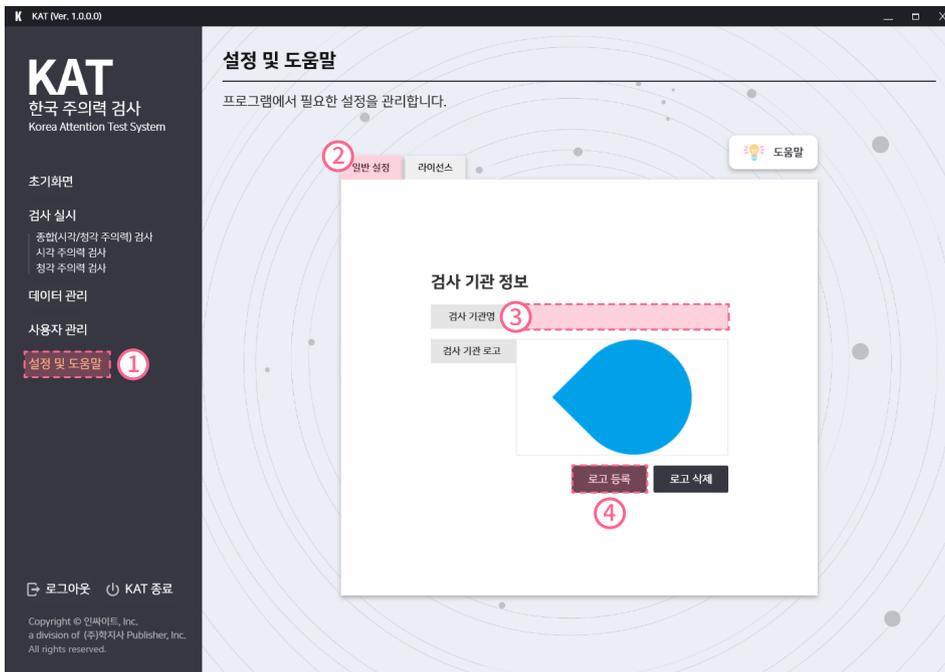

설정 > 일반 설정 > 검사 기관명 기입 > 로고 등록

로고를 변경할 경우 업로드 되어있는 로고를 삭제 후에 재등록 하시면 됩니다.

Q&A 2 PC, 태블릿 공통

장치 고유번호가 무엇인가요?

라이선스와 프로그램이 설치된 PC를 연동하기 위한 해당 PC의 고유한 번호입니다.



기타

Q&A 1 PC

하나의 라이선스로 여러 컴퓨터에 사용 가능한가요?

라이선스가 이미 등록 완료된 경우

최초 등록한 PC에서만 검사를 실시 할 수 있습니다.

다른 PC에서 검사를 실시하고자 할 경우

새로운 라이선스를 발급 받아야 합니다.



KAT

Korean Attention Test system

한국판 전산화
주의력 검사
도움말

insy^t Insight of psychology **인사이트**
심리검사연구소
